

COVID-19 | Prélèvement d'échantillon à l'aide d'une solution de rinçage de la gorge

Instructions pour les cabinets médicaux et centres de prélèvements


Différentes méthodes proposées par SYNLAB, permettent d'obtenir le matériel nécessaire à la détection d'une infection par le virus du SARS-CoV-2. Nous vous présentons ici la méthode par solution de rinçage de la gorge. Outre le fait que la procédure soit bien plus agréable qu'avec les autres méthodes, elle réduit également le contact direct puisque le prélèvement en lui-même est effectué par le patient. Veuillez noter que le test gold standard reste le frottis naso-pharyngé.

La première partie de ces instructions décrit la préparation des documents et du matériel de prélèvement nécessaires. La deuxième partie explique la procédure de prélèvement de l'échantillon.

PRÉPARATION AVANT LE PRÉLÈVEMENT

Contenu du kit de test :

- A** Formulaire de demande d'analyse, incl. étiquettes autocollantes avec code-barre
- B** Pot de prélèvement et ampoule de NaCl (10ml)
- C** Tube sous vide (ne pas ouvrir!)
- D** Tube de transport

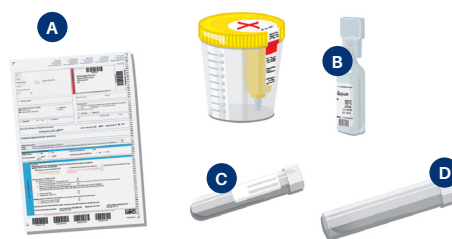


Le patient ne doit **ni manger ni se brosser les dents** au moins 30 à 60 minutes précédant le prélèvement.

Le patient se présente **portant un masque** et ne peut l'enlever que pour se gargariser.

A des fins d'**hygiène/désinfection** préparer aussi : gants, désinfectant, sac poubelle.

Pendant le gargarisme, des aérosols peuvent se former. Dans la mesure du possible, le prélèvement doit être effectué par le patient seul dans la pièce ou en respectant une distance de sécurité. La pièce doit ensuite être bien aérée.

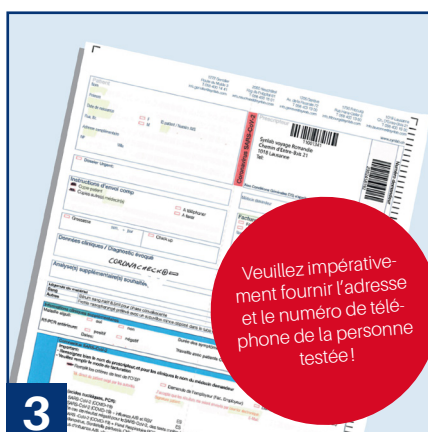


Remplissez le formulaire de demande d'analyse dans son intégralité.


Veuillez coller les étiquettes du bas du formulaire sur :

- le tube sous vide (C)
- le tube de transport (D)
- le questionnaire SYNLAB ou corona-check, si applicable*

En plus de l'étiquette, veuillez également inscrire le nom et le prénom du patient sur le tube sous vide (C) à l'aide d'un marqueur permanent.

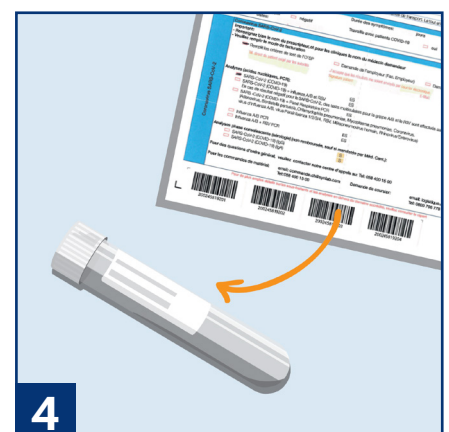

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON

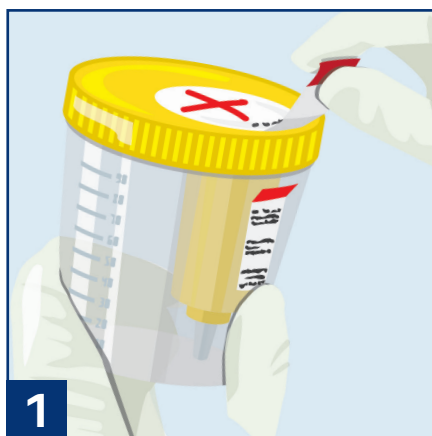


Remarque: Pendant le gargarisme, des aérosols peuvent se former. Dans la mesure du possible, le prélèvement doit être effectué par le patient seul dans la pièce ou en respectant une distance de sécurité. La pièce doit ensuite être bien aérée.

Retirez le sceau adhésif du pot de prélèvement.

Préparez le pot de prélèvement préalablement ouvert.

Donnez au patient l'ampoule de NaCl (10ml).

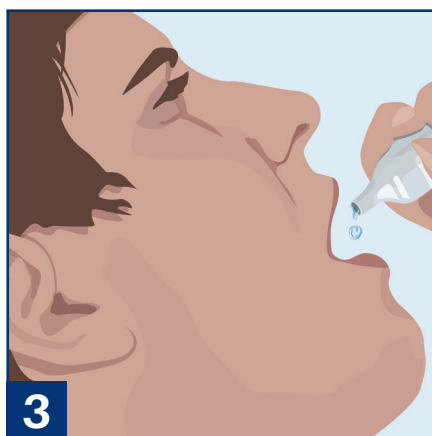


Le patient presse l'ampoule pour vider son contenu dans sa bouche (sous la langue).

Gargariser 30 secondes au fond de la gorge!

Il est possible de faire des pauses en gardant l'eau de rinçage dans la bouche tout en respirant par le nez.


Le patient crache ensuite la solution gargarisée dans le pot de prélèvement, qu'il pose ensuite sur la table. **Fermez le pot avec précaution.**

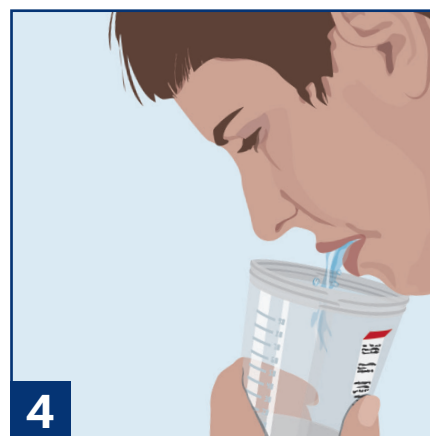

Placez le tube sous vide fermé (C) sur le pot de prélèvement (B) et le presser dans la tige. L'eau de rinçage est alors aspirée dans le tube grâce à l'effet de vide.

Retirez le tube sous vide et préparez-le à l'expédition en y joignant le formulaire de demande et autres documents applicables.

L'expédition se fait conformément aux processus logistiques définis: Le tube (C) doit être placé dans le tube de transport (D) puis, soit dans le sachet de laboratoire habituel soit déposé directement dans un de nos centres.

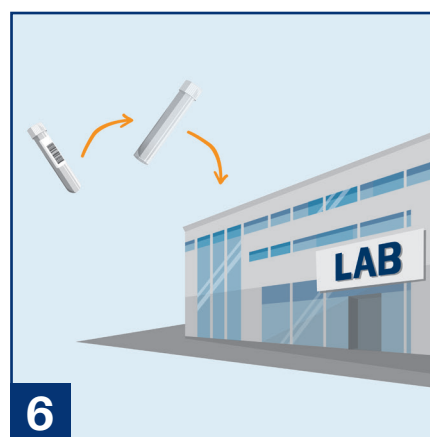

* Avant le prélèvement veuillez vous assurer que le patient a complété le corona-check ou le questionnaire SYNLAB afin que l'analyse puisse être prise en charge par la Confédération.

Veuillez respecter les règles d'hygiène. Éliminez le pot (ne pas l'envoyer au laboratoire), désinfectez la table et les surfaces et objets contaminés et aérez l'espace de prélèvement.

Veuillez vous référer en tout temps aux mesures actuelles de l'OFSP (www.bag.ch)