

Neu: eSwab mit drei Tupfergrössen

Anstelle eines separaten Entnahmesets für Keuchhusten* und anstelle der bisher separat mitgelieferten Tupfer aus Nylonwatte gibt es jetzt ein optimales Allzweck-eSwab-Entnahmeset. Es gibt drei Tupfergrössen; alle aus einem speziell präparierten Nylon, welches die Erregerausbeute maximiert und gegenüber der Nylonwatte deutliche Vorteile bringt.

Alle Tupfer haben eine Sollbruchstelle (rote Markierung), so dass sie für den Transport ins Röhrchen verbracht werden können. Der grüne Tupfer ist etwas länger als das Röhrchen, findet aber problemlos darin Platz.



Einsatz der Tupfer

weiss: normal grosser Tupfer für alle Abstriche

violett: feiner Tupfer, z.B. für
Cervixabstriche bei Nullipara oder
Urethralabstriche beim Mann

grün: extrafeiner Tupfer für
transnasale Abstriche (Keuch-
husten, Influenza und andere
respiratorische Viren,
Mykoplasmen)

* Das eSwab-Entnahmeset ersetzt das bisherige Pertussis Set.