



Metanefrine plasmatiche libere e totali

Preparazione del paziente

- Nelle 24 ore precedenti il prelievo, evitare il consumo di caffè, tè, cioccolato, banane, alcol e non fumare.
- Presentarsi a digiuno.
- Far rimanere il paziente in posizione supina, posizionare un catetere venoso periferico (Venflon®) per evitare lo stress indotto dalla venipuntura ed eseguire il prelievo di sangue dopo 15 minuti.

Materiale di prelievo

- 1 provetta di Eparinato di litio per Metanefrine plasmatiche libere
- 1 provetta di Eparinato di litio per Metanefrine plasmatiche totali

Preparazione del campione

- Il prelievo deve essere effettuato in una provetta con eparina di litio, che deve essere immediatamente collocata nel ghiaccio. Al massimo 30 minuti dopo, centrifugare per 10 minuti a 4 °C a 2500 g.
- Preparare 2 aliquote di plasma (almeno 1,0 mL ciascuna) per il dosaggio delle metanefrine libere e 2 aliquote di plasma (almeno 1,0 mL ciascuna) per il dosaggio delle metanefrine totali. Congelare rapidamente tutte le aliquote a -20 °C.
- Trasportare i campioni congelati in laboratorio. Qualora non fosse possibile eseguire la centrifugazione, concordare il ritiro con il laboratorio contattando il numero 091 973 56 20.