

Istruzioni per il prelievo del campione di saliva (test salivare)


Test PCR per la ricerca del virus SARS-CoV-2

La ricerca del coronavirus (COVID-19) si può eseguire analizzando diversi tipi di campioni.


Uno dei metodi consiste nel testare la saliva. Per il paziente il procedimento è più confortevole e semplice da eseguire rispetto ad altri metodi.

Tenga presenti le indicazioni preparatorie e le istruzioni seguenti.


Verifichi e si accerti di avere a disposizione i seguenti materiali.

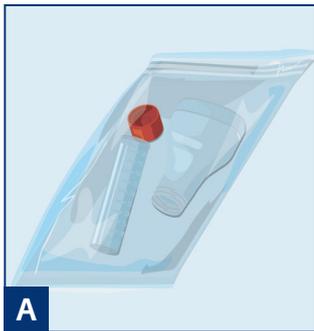

A Provetta per il prelievo di saliva con scala graduata e imbuto di raccolta

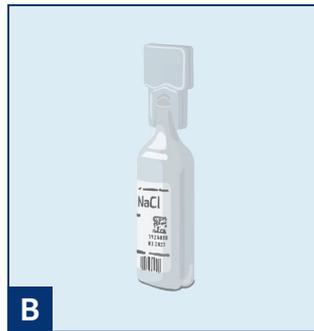

B Fiala di NaCl da 5 ml

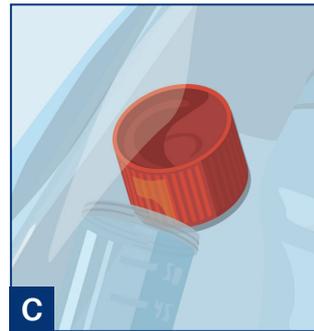


C Tappo per chiudere il contenitore della saliva



D 1 Provetta per il trasporto con carta assorbente



E 1 etichetta adesiva con codice a barre

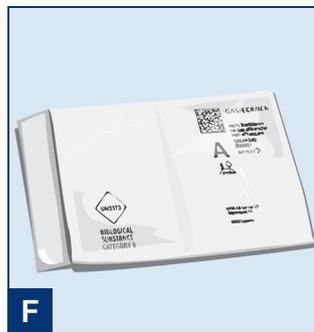

F Busta per la spedizione di ritorno

Si accerti che la scala graduata sulla provetta per la saliva non sia coperta, in modo da poter controllare che il campione sia della quantità corretta (2ml).

Dopo aver prelevato il campione, si accerti che la provetta **(A)** in cui ha raccolto la saliva sia contrassegnata con un'etichetta con codice a barre **(E)**.

Importante per il campionamento a domicilio!

Se le è stato spedito questo kit e sul codice a barre **(E)** non c'è il suo nome, è necessario che innanzitutto effettui la scansione dell'etichetta con il codice a barre **(E)** con l'app MEDISYN Access. Senza questo passaggio per noi è impossibile classificare il campione e non possiamo inviarle i risultati. In caso di problemi contatti immediatamente il nostro Customer Service.

Per garantire una buona analisi è indispensabile che lei segua esattamente le istruzioni al momento del prelievo del campione:

1 | Indicazioni preparatorie



Nelle 2 ore precedenti il prelievo di saliva si sciacqui la bocca con acqua per eliminare eventuali resti di cibo.

In questo lasso di tempo non deve mangiare, bere, fumare né masticare gomme.



È importante assicurarsi che il campione prelevato sia di saliva e non di espettorato.

Per una buona igiene/disinfezione:

Si lavi bene le mani e collochi un disinfettante per le mani su una superficie vicina.

2 | Istruzioni per il prelievo del campione



1 Faccia accumulare la saliva in bocca. Si può favorire la produzione di saliva pensando al proprio cibo preferito o stimolando le guance e il palato con la lingua.



2 Lasci scendere passivamente nella provetta, attraverso l'imbuto, la saliva accumulata. Faccia attenzione a non sputare ed eviti che si formino bolle dando lievi colpetti sul contenitore.




3 Ripeta il procedimento finché la provetta non conterrà 2 ml di saliva. La scala graduata sulla provetta la aiuterà a determinare il livello di riempimento da raggiungere.



4 Sviti il tappo dalla fiala di NaCl.




5 Mediante l'imbuto di raccolta, versi la soluzione di NaCl nella provetta per il prelievo di saliva.

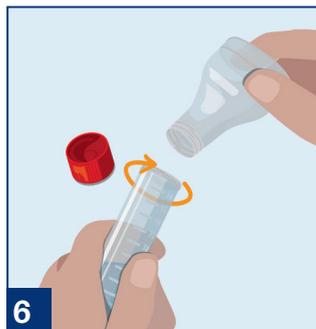

6 Sviti l'imbuto di raccolta e chiuda la provetta con il tappo fornito. Muova più volte avanti e indietro la provetta ben chiusa in modo da miscelare NaCl e saliva.



7 Applichi l'etichetta con il codice a barre sulla provetta per il prelievo di saliva.

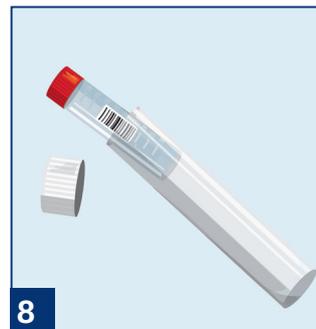

8 Inserisca la provetta ben chiusa e correttamente etichettata nella provetta protettiva (=provetta per il trasporto).



9 Inserisca la provetta per il trasporto, con la provetta per il prelievo di saliva al suo interno, nella busta richiudibile fornita.



10 Consegna della busta:
a) Prelievo del campione in hotel / farmacia / ufficio: consegnì la busta al punto di raccolta che le viene indicato.
b) Campionamento a domicilio: consegnì la busta all'ufficio postale più vicino in Svizzera.



11 Il risultato le sarà inviato per via elettronica, tramite l'app MEDISYN Access o con un messaggio via e-mail.

Contatto
MEDISYN SA
 Customer Service
 0800 393 393
 customerservice.ch@medisyn.ch
 www.medisyn.ch